



GRAD

www.med37grad.com

Gebrauchsinformation / Kalt

Für die Verwendung im Tiefkühlfach / Gefrierschrank.
37Grad Wärme-Kälte-Kissen gefüllt mit gereinigten, entstaubten und getrockneten Traubenkernen.
Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Anwendung kalt bei z.B.:

- Schwellungen
- akuten Entzündungen
- Zerrungen
- Prellungen
- Sportverletzungen
- Arthritis
- Rheuma
- Migräneattacken
- Kopfschmerzen
- nach operativen Eingriffen
- und auch sonst überall, wo Kälte zur Unterstützung und Linderung empfohlen wird.



Anleitung kalt:

Das 37Grad Kältekissen ins Gefrierfach legen (mindestens 4 bis 5 Stunden) bis das Kältekissen genügend Kälte in sich aufgenommen hat. Nach vorangegangener Handprüfung auf die gewünschte Körperstelle auflegen. Durch die angenehm milde Kälteabgabe (nicht so aggressiv und Entfall des Autscheffektes) erreichen Sie eine Tiefenkühlung z.B. auch an Gelenken. Die Kältespeicherung und Intensität lässt sich steigern, indem Sie z.B. ein Handtuch auf das Kältekissen legen. Erfrierungen können Sie vermeiden, indem Sie das Kältekissen immer nur kurzzeitig anwenden und gegebenenfalls einen Baumwollüberzug verwenden.

Wichtig:

Achten Sie auf die unterschiedliche Temperaturempfindlichkeit der Haut bei Kleinkindern und sensibilitätsgestörten Personen gegenüber Erwachsenen und normal empfindlichen Personen. Beachten Sie stets die Anwendungsdauer.

Wichtig:

Achten Sie auf Kontraindikationen für Kälteanwendungen wie z.B. bei: Neugeborenen und Kleinkindern, bewusstlosen, narkotisierten und gelähmten Patienten, Patienten mit Sensibilitätsstörungen, Morbus Raynaud, Patienten mit Durchblutungsstörungen und vielen weiteren mehr.

Desinfektion / Reinigung:

Sollte das 37Grad Kältekissen verschmutzt sein, können Sie dieses mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel abwischen und reinigen. Wir empfehlen die Verwendung einer Seifenlauge.

Nach jedem Gebrauch/ Patientenwechsel ist das Kissen zu desinfizieren. Nur Wisch- bzw. Oberflächendesinfektion, nicht auf der Oberfläche reiben, nicht in Desinfektionslösung einlegen. Nach der Desinfektion/Reinigung (Einwirkzeit beachten) sollte immer mit einem feuchten Tuch nachgewischt werden.

Haltbarkeit:

Das 37Grad Kältekissen ist nahezu unbegrenzt haltbar. Wir empfehlen im klinischen Bereich aufgrund der Wirksamkeit der speziellen Beschichtungen das Kissen alle 2 bis 3 Jahre auszutauschen. Auf Risse und Materialermüdung ist jedoch zu achten und gegebenenfalls ist das Kissen vorzeitig zu erneuern. Keine scharfen Gegenstände auf der Oberfläche verwenden.

Lagerung:

Lagern Sie das Kältekissen trocken.

Garantie:

Garantieleistung nur bei sachgerechter Benützung - nicht bei Überhitzung.
Kein Spielzeug für Kinder.

